


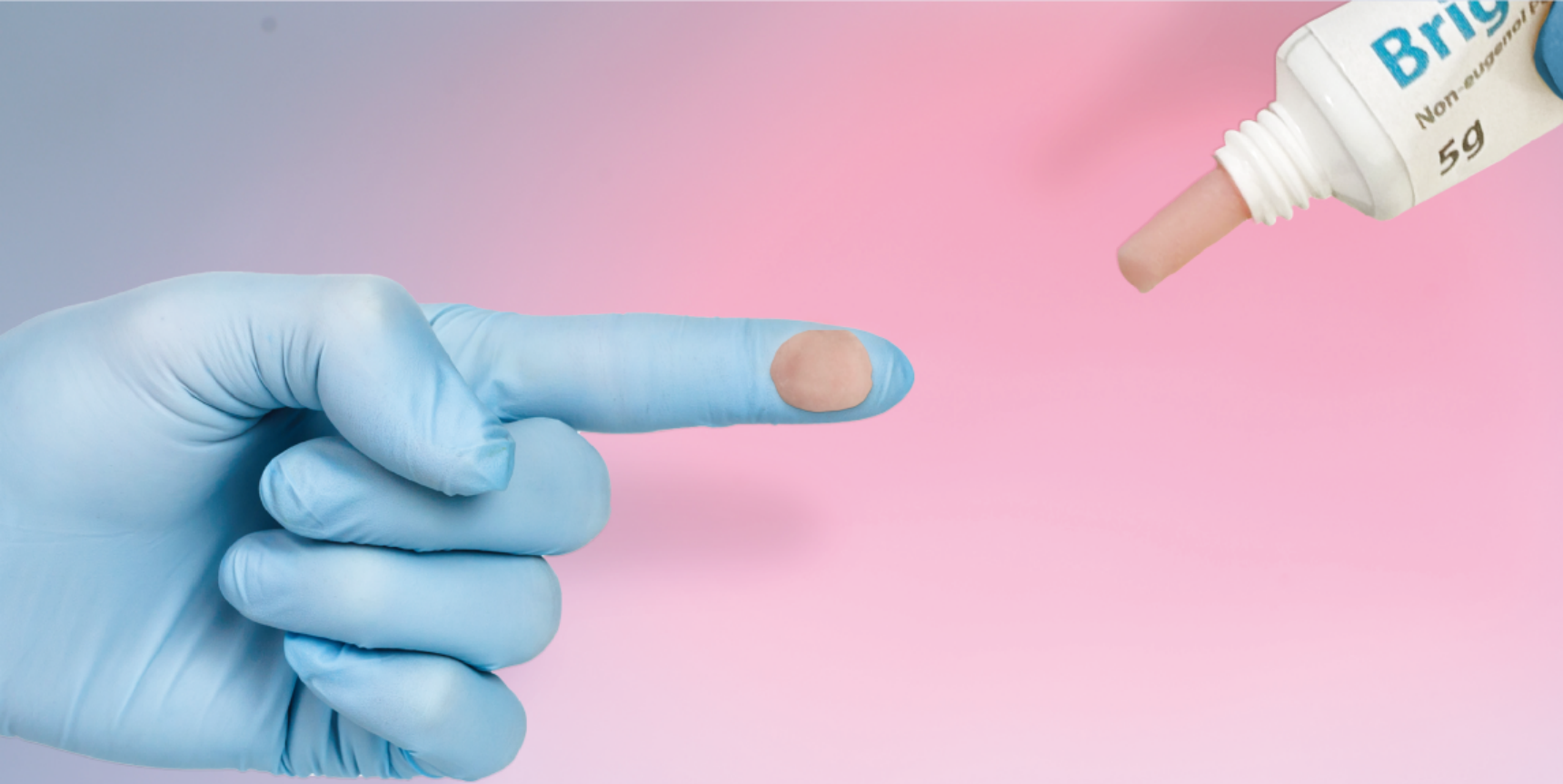

치주질환 및 수술 부위에
도포하여 사용하는 치주 창상 피복재

Bright Oral-Pack

Non-eugenol Periodontal Wound Dressing

1액형 연고 타입

혼합 없이 원하는
부위에 간편 적용

제거 불필요

3~4일 내 자연 분해,
안전한 섭취 가능

자연스러운 심미성

치은과 유사한 색상

Bright Oral-Pack

Clinical Application



1

보호 및 통증 감소
창상부(수술·Suture 부위)



적용 전



적용 후

2

마찰 최소화
교정장치



적용 전



적용 후


Bright Oral-Pack

How To Use



Step 1

장갑에 직접 물을 묻히거나,
물에 적신 거즈를 손가락에 감는다.

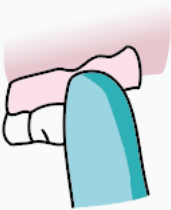

Step 3

물이 묻은 장갑 또는 거즈로
표면을 매끄럽게 부착한다.

Step 2

적절한 양을 짜내어 혼합 과정 없이
병변 부위에 적용한다.

Step 4

환자에게는 내원 기간 동안 물리적 접촉을 피하고,
가급적 창상 부위를 건드리지 않도록 안내한다.

Order Information



타입	모델명	용량	구성
튜브형	PDW005	5g	5g x 5ea
	PDW025	25g	25g x 1ea