

牙周疾病及手术部位 涂抹使用的牙周创面覆盖材料

Bright Oral-Pack

无丁香酚牙周伤口敷料

液态软膏类型

无需混合,可轻松
敷于所需部位

无需移除

3-4天内自然分解
成分可安全食用

自然美观

与牙龈颜色相似

Bright Oral-Pack

临床应用




1

保护及疼痛减轻
伤口部位(手术缝合处)



使用前

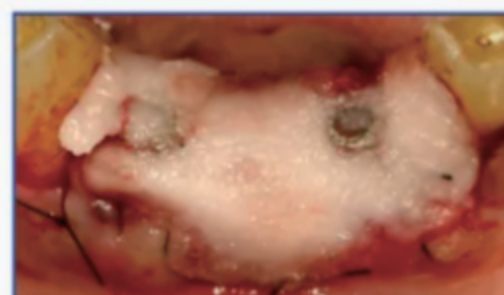

使用后

2

最小化摩擦
矫正装置



使用前



使用后

Bright Oral-Pack

使用方法



Step 1

直接在手套上沾水，或将浸湿的纱布缠绕在手指上。



Step 3

用沾水的手套或纱布将表面平整地贴合。

Step 2

挤出适量，无需混合直接涂抹于病变部位。

Step 4

告知患者在就诊期间避免物理接触，并尽量不要触碰创面。

产品规格



类型	型号	容量	组成
管状	PDW005	5g	5g x 5ea
	PDW025	25g	25g x 1ea