

Easy Bone Graft

Collagen Membrane **Soft**

Flexible Handling,
Reliable Barrier



Enhanced Tear Resistance

높은 인장강도로 핀 고정 및 시술 중 찢김 방지

Superior Flexibility & Easy Handling

유연한 구조로 시술 부위 적응과
커팅 용이하며 양면 사용 가능

Collagen Membrane Soft

더 유연하고 다루기 쉬운 차단막을 찾는다면!
Collagen Membrane Soft가 답이다!



뛰어난 유연성

Soft Type 구조로 부드럽고 유연하여,
시술 부위에 쉽게 밀착되고 안정적으로 적용됩니다.



우수한 찢김 저항성

높은 인장강도로 핀 고정 시 찢김 없이
안정적인 차단막 유지가 가능합니다.



약 4개월간 지속되는 흡수형 차단 기능

적절한 흡수 속도로 4개월간 차단 기능이 유지되어
단기 GBR 및 중소 결손부위에 적합합니다.




향상된 조작성

부드러운 질감으로 커팅이 용이하며, 시술 중
원하는 형태로 빠르고 간편하게 적용할 수 있습니다.




Collagen Membrane **Soft**

다층 구조로 완성된 유연한 흡수성 차단막

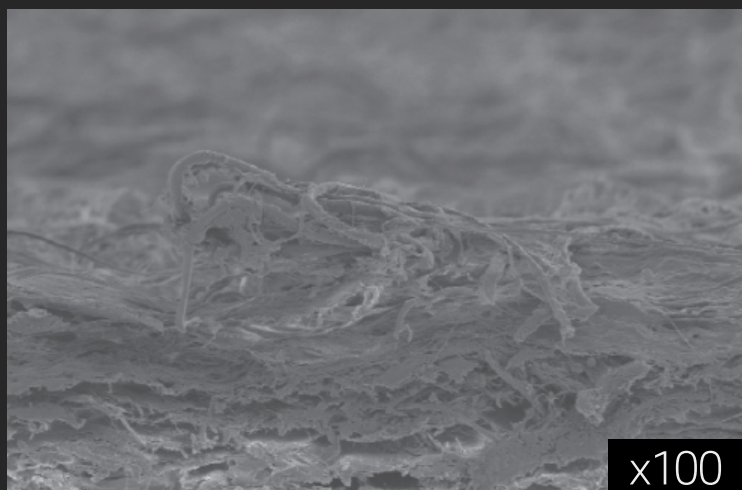

x100

다층 콜라겐 구조로 찢김 저항성 강화

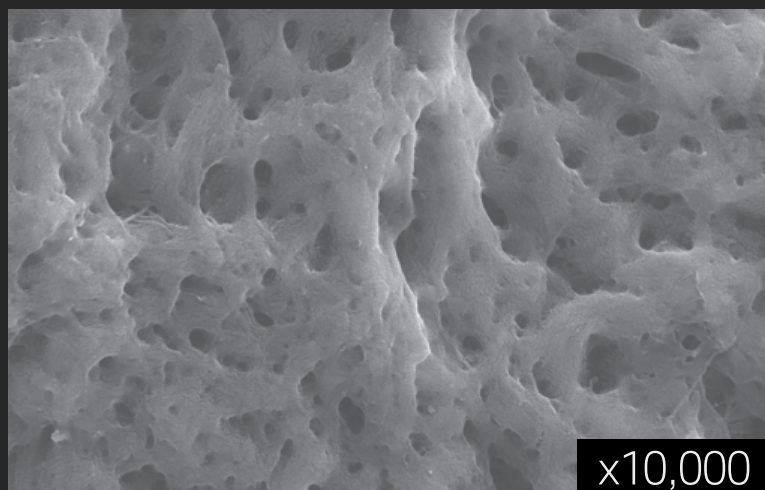


x10,000

미세한 섬유 네트워크로
우수한 유연성과 적응력 제공

Clinical Case

Management of Anterior Narrow Ridge

케이스 제공 : 이중석 교수(연세대학교치과병원 치주과)

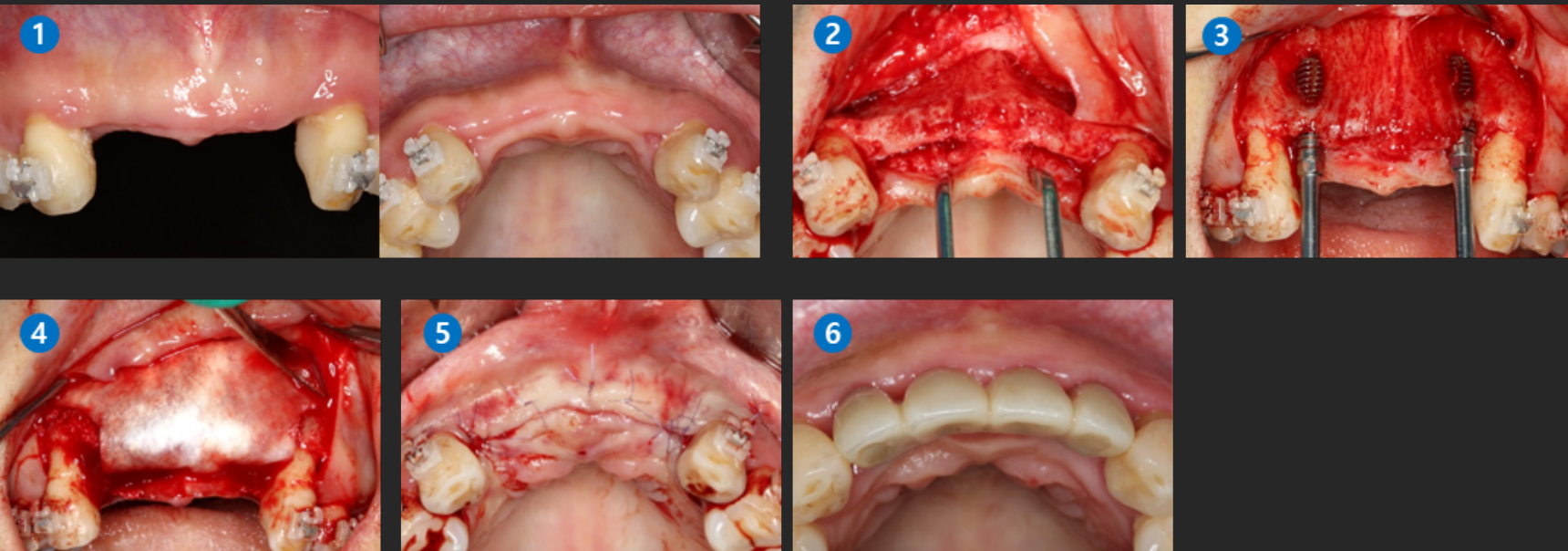

1 Pre-Op

2 Retentive Flap Technique

3 Implantation (SuperLine II)

4 Application of **OSTEON™ Xeno, Collagen Membrane Soft**

GBR on #12,22 buccal dehiscence and fenestration defect area (no fixation, no stabilizing suture)

5 Suture

6 Follow up (after 1Y)



Pre-Op



Post-Op



Follow up(after 2Y)




Follow up(after 2Y)




Clinical Case

Buccal Bone Reconsturction

케이스 제공 : 이중석 교수(연세대학교치과병원 치주과)

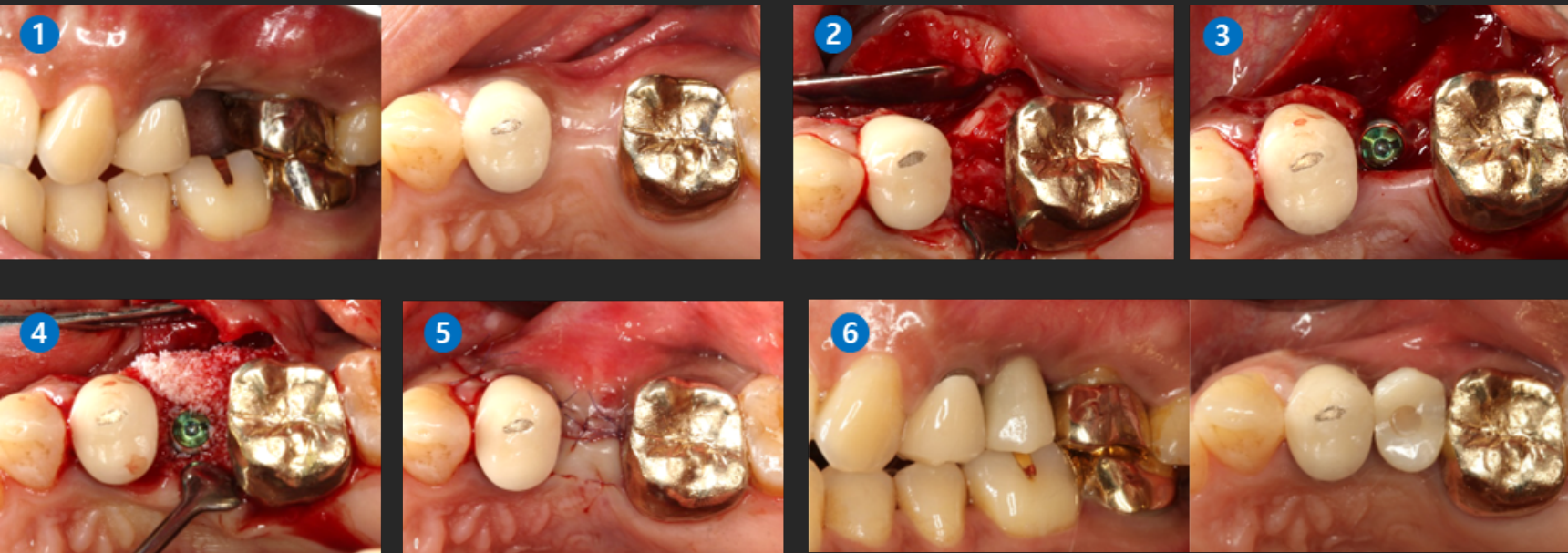

- 1 Pre-Op
- 2 Flap reflection
- 3 Implantation (SuperLine II)
- 4 Application of **OSTEON™ Xeno, Collagen Membrane Soft**
Membrane fixation with Membrane Pin
- 5 Suture
- 6 Follow up (after 1Y)

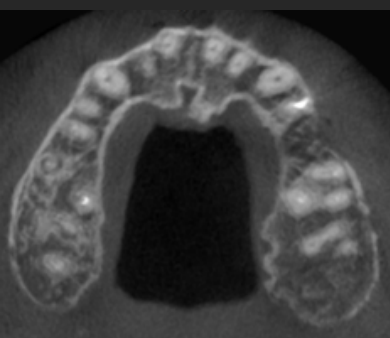

Pre-Op





Post-Op



Follow up(after 4M)



Follow up(after 1Y)

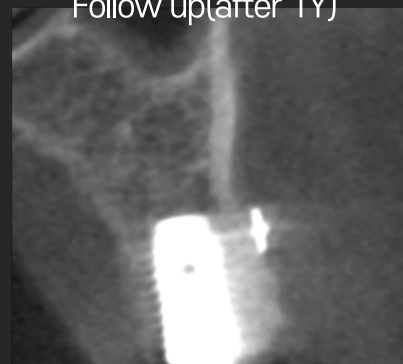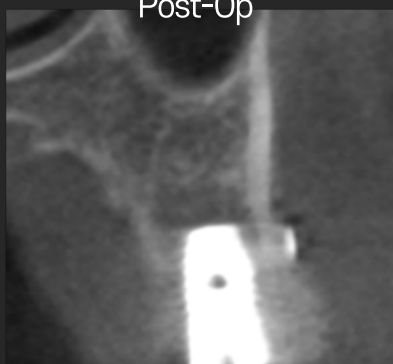

Collagen Membrane **Soft**



Order Information

Type	REF	Size (mm)	Thickness (mm)
Square	CM1020S	10 x 20	0.3
	CM1520S	15 x 20	
	CM1530S	15 x 30	
	CM2030S	20 x 30	
	CM3040S	30 x 40	